



Производитель компания REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH,
D-49610 Quakenbrück, Германия

Tel: +49(0)5431-9416-66

www.rebotec.de, info@rebotec.de

Эксклюзивный представитель ООО «Медтехника РЕБОТЕК»

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

Tel: +7 (495) 504-26-51, 504-26-53

www.rebotec.net, info@rebotec.net

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ*

Кресла-стулья с санитарным оснащением

Наименование	Модель	Колеса/ножки	Материал
Ерфурт	334.54	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Бонн	343	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Бостон	342.54	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Берлин	344	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Аугсбург	339...97	3/4/5-дюймовые колеса	TRB 3000
Нью-Йорк	369.54(150)	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Франкфурт	355	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Чикаго	369.54(200)	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Даллас	369.54(200)	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Денвер	369.54(175)	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Атланта	369.54(175)	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Гамбург	356	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Варио 2	371.33	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Мальта	367.54.30	5-дюймовые колеса	TRB 3000

334



339...97

343



369.54(150)

344



361.54(175)



Применение

Настоящие кресла-стулья с санитарным оснащением предназначены для применения в домашних условиях, а также в больницах и реабилитационных центрах. Пользуясь этими стульями, пациент в меньшей степени нуждается в помощи других людей при приеме душа и туалета. Стулья имеют достаточно комфортные сидения, эргономичные ортопедические спинки, способствующие длительному и комфортному пребыванию пациента в сидячем положении.

Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

Инструкции по монтажу и эксплуатации

1. Установите спинку, надев ее на трубки в задней части кресла.
2. Установите подлокотники, соедините со спинкой.
3. Зацепите подножки в передней части кресла и зафиксируйте их в пазах.
4. Поверните подлокотник: поставьте подлокотники в горизонтальное положение и закрепите штифтами в соответствующих отверстиях.
5. Настройте подножки: поверните подножки в удобное для Вас положение. Установите подножки на ножку стула, как показано на схеме.
6. Поворот подножек: подножки имеют возможность свободно поворачиваться на угол до 90⁰.
7. Снятие подножек: снимите сидение как показано на поз. 11. Затем поверните подножки на 10 см и поверните на угол 90⁰ в сторону. Теперь Вы можете свободно вынимать подножки.
8. Снятие душевого или туалетного сидения: съемные сидения позволяют легко их снимать – просто нажмите на него и потяните на себя.
9. Снятие спинки: нажмите на кнопки, расположенные с тыльной стороны, и потяните вперед и вверх.
10. Установка туалетного судна: просто вставьте судно в направляющие, расположенные сзади стула. Чтобы вытащить – повторите предыдущую операцию в обратном порядке.

Чистка и уход

Каркас стула полностью выполнен из пластика. Очистка стула очень проста и может проводиться обычными чистящими и моющими средствами. Следуйте указанием в документации производителя. Все движущиеся части обработаны смазкой для длительного использования.

Из соображений безопасности и во избежание аварий (за все время использования выявлены не были), проведите экспертизу в представительстве компании REBOTEC или в своем медицинском реабилитационном центре.

Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В

целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

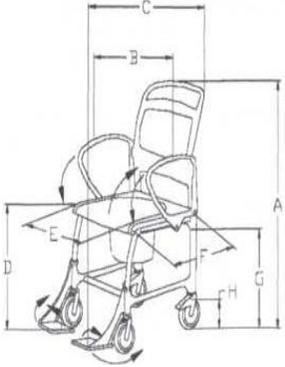
Требования безопасности

Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!

Всегда ставьте стул только в горизонтальное положение! Даже если вы на нем не сидите. Никогда не ставьте стул на ступеньки. На стул можно садиться только при установленном подлокотнике. При неровно посаженных наконечниках устойчивость нарушается. Не переносите стул вместе с пациентом.

Технические характеристики

Наименование	Модель	Масса, кг	Нагрузка, кг
Ерфурт	334.54	11,9	130
Бонн	343	14,5	130
Бостон	342.54	14,6	150
Берлин	344	15,9	130
Аугсбург	339...97	16,0-16,9	100
Франкфурт	355	13,3	130
Чикаго	369.54	19,0	200
Даллас	369.54	20,0	200
Денвер	369.54	19,0	175
Атланта	369.54	20,0	175
Гамбург	356	15,0	130
Мальта	367.54.30	19,3	130
Нью-Йорк	369.54	15,1	150
Варио 2	371.33	10,5	130

Размеры, см	Нагрузка, кг					
	100	130	150	175	200	
А. Высота	117	101	102	102	102	
В. Ширина	52,5	57-70,5	62	68-74	68-74	
С. Длина	57,5	62	65	64	65,5	
Д. Высота	54,5	53	53-55	57	56,5	
Е. Ширина сидения	39,5	46	50	57,5	62	
Ф. Длина сидения	41,5	45-64	45	48	48	
Н. Диаметр колеса	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	

По заказу, дополнительно кресла туалетные могут оснащаться следующими принадлежностями:

Модель	Назначение

301..	Туалетное судно с крышкой
303.00	Туалетное судно для мод. 339..97
305..	Туалетное очко с гигиеническим судном и откидной крышкой
307...	Крышка для туалетного очка
308.54	Сидение для душа пластиковое
309.54	Крепеж для судна пластиковый
312.10.00	Ремень для мод. 339..97
440.10.01	Туалетное сидение с держателем судна
440.10.02	Спинка для мод 339..97
440.10.03	Мягкая полиуретановая крышка для мод. 339..97
440.10.04	Мягкое сидение
440.10.32	Подлокотник с полиуретановой накладкой
440...60	Прокладка на спинку стула из TRB 3000
440...62	Мягкая полиуретановая крышка
440...67	Адаптер высоты опоры стопы
440.45.69	Стабилизатор задний 46 см
440.50.69	Стабилизатор задний 50 см
440...70	Передний стабилизатор стандартный
440...73	Передний стабилизатор гигиенический
442.00.80	Колеса передние для моделей 175 кг
442.00.81	Колеса задние для моделей 175 кг с тормозами
444.03.39	Спинка с ручками и подголовником для мод. 339...97
444.10.04	Сидение мягкое с держателем судна
445.00.80	Колеса передние для моделей 200 кг
445.00.81	Колеса задние для моделей 200 кг с тормозами
445.10.59	Накладка для спины из полиуретана для моделей свыше 150 кг
447...57	Опора стопы левая для моделей свыше 150 кг
447...59	Опора стопы правая для моделей свыше 150 кг
449.01.80/81/82	Колеса передние/задние диаметром Ø12,5 см
450.10.05	Фиксатор для подлокотников
470...22	Карго бокс на трубу диаметром Ø22 мм (емкость транспортная)

***Гарантийный талон на сервисное обслуживание**

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - **24 месяца** со дня продажи. Исключение составляют изнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции должен быть произведен в компании **ООО «Медтехника РЕБОТЕК»** с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - **36 месяцев**.

Регистрационное удостоверение № **ФСЗ 2009/04932**, сертификат соответствия № **РОСС DE.ИМ25.А02928** **Внимание!** Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля...) НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 N1222 от 06.02.2002 N81)

Дата продажи: « ____ » _____ 20 г.

